



ARKUSZ FOLII OCHRONNEJ DO TATUAŻU 10CM X 15CM

CENA: **4,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

FOLIA OCHRONNA DO TATUAŻU - SECOND SKIN.

OPAKOWANIE ZAWIERA 1 ARKUSZ W FORMACIE 10 CM X 15 CM ODCIĘTY Z ROLKI.

FOLIA TATTOO PROTECT TO HIPOALERGICZNA, WODOODPORNAA OCHRONNA I PARO-PRZEPUSZCZALNA FOLIA OCHRONNA TZW. "DRUGA SKÓRA".

ZAPEWNIĄ ODPOWIEDNIE ŚRODOWISKO W TRAKCIE GOJENIA, CHRONI NOWY TATUAŻ PRZED ZAGROŻENIAMI ZAKAŹNYMI Z ZEWNĄTRZ ORAZ OGRANICZA TARCIE OD UBRĄŃ. FOLIA JEST WODOODPORNĄ I PAROPRZEPUSZCZALNĄ, POZWALA DOPROWADZIĆ TLEN DO SKÓRY ORAZ ODPAROWAĆ NADMIAR WILGOCI SPOD FOLII.

JEST BARDZO WYGODNA W UŻYCIU, NAKLEJONA NA SKÓRĘ JEST PRAKTYCZNIE NIEWYCZUWALNA, ELASTYCZNA I ROZCIĄGLIWA. POZWALA TO NA UMIESZCZENIE JEJ W DOWOLNYM MIEJSCU NA CIELE I POZOSTAWIENIE NA KILKA DNI.

SecondSkin™ — ochronna folia na tatuaż

Zastosowanie:

- Zalecamy ochronę świeżego tatuażu przez okres 12-48 godzin.

- Opatrunek należy wymieniać na nowy nie później niż po 24 godzinach nieprzerwanego noszenia.
- W trakcie zdejmowania należy umieścić skórę pod strumieniem ciepłej wody (zalecamy robić to pod prysznicem).
- W przypadku silnie sączącego się tatuażu zaniechać stosowania.
- Po odklejeniu opatrunku od skóry może wystąpić lekkie zaczerwienienie naskórka, nie ma powodu do obaw.

Sposób użycia:

- Przed opatrzeniem skóry, przemyj ją letnią wodą z mydłem.
- Osusz skórę — upewniając się, że nie ma na niej pozostałości mydła lub wody. Użyj do tego np. jednorazowego papierowego ręcznika.
- Zdezynfekuj wytatuowaną skórę i poczekaj do jej wyschnięcia.
- Odetnij z rolki odpowiedni arkusz opatrunku, upewniając się, że wystarczy go na pokrycie tatuażu z co najmniej trzema centymetrami marginesu. Jeśli tatuaż jest większy niż możliwy do wycięcia arkusz, wytnij więcej kawałków i naklejaj je na zakładkę o szerokości od 5 do 10 milimetrów.
- Zerwij dolny papier ochronny znajdujący się u spodu strony zadrukowanej i ostrożnie naklej folię na wytatuowaną nienaciągniętą skórę.
- Zdejmij zadrukowaną wierzchnią folię zabezpieczającą i dociśnij lekko cały opatrunek do skóry. Gotowe!