


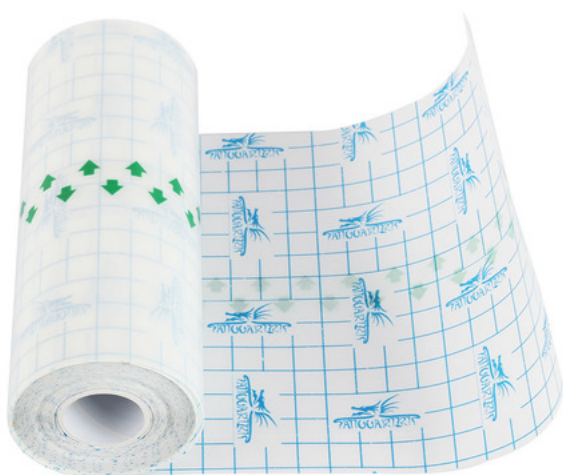

TATTOO FILM FOLIA OCHRONNA DO TATUAŻU ROLKA 100CM X 15CM

CENA: **25,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

Opakowanie zawiera 10 arkuszy, w formacie rolki 100 cm x 15 cm.

Folia Tattoo Protect to hipoalergiczna, wodoodpornaochronna i paro-przepuszczalna folia ochronna tzw. "druga skóra".

Zapewnia odpowiednie środowisko w trakcie gojenia, chroni nowy tatuaż przed zagrożeniami zakaźnymi z zewnątrz oraz ogranicza tarcie od ubrań. Folia jest wodoodporna i paroprzepuszczalna, pozwala doprowadzić tlen do skóry oraz odparować nadmiar wilgoci spod folii.

Jest bardzo wygodna w użyciu, naklejona na skórę jest praktycznie niewyczuwalna, elastyczna i rozciągliwa. Pozwala to na umieszczenie jej w dowolnym miejscu na ciele i pozostawienie na kilka dni.

SecondSkin™ — ochronna folia na tatuaż

Zastosowanie:

- Zalecamy ochronę świeżego tatuażu przez okres 12-48 godzin.
- Opatrunek należy wymieniać na nowy nie później niż po 24 godzinach nieprzerwanego noszenia.
- W trakcie zdejmowania należy umieścić skórę pod strumieniem ciepłej wody (zalecamy robić to pod prysznicem).
- W przypadku silnie ścącego się tatuażu zaniechać stosowania.

- Po odklejeniu opatrunku od skóry może wystąpić lekkie zaczerwienienie naskórka, nie ma powodu do obaw.

Sposób użycia:

- Przed opatrzeniem skóry, przemyj ją letnią wodą z mydłem.
- Osusz skórę — upewniając się, że nie ma na niej pozostałości mydła lub wody. Użyj do tego np. jednorazowego papierowego ręcznika.
- Zdezynfekuj wytatuowaną skórę i poczekaj do jej wyschnięcia.
- Odetnij z rolki odpowiedni arkusz opatrunku, upewniając się, że wystarczy go na pokrycie tatuażu z co najmniej trzema centymetrami marginesu. Jeśli tatuaż jest większy niż możliwy do wycięcia arkusz, wytnij więcej kawałków i naklejaj je na zakładkę o szerokości od 5 do 10 milimetrów.
- Zerwij dolny papier ochronny znajdujący się u spodu strony zadrukowanej i ostrożnie naklej folię na wytatuowaną nienaciągniętą skórę.
- Zdejmij zadrukowaną wierzchnią folię zabezpieczającą i dociśnij lekko cały opatrunek do skóry. Gotowe!