



DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I NARZĘDZI MEDISEPTOL 1L

CENA: **29,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

ALPINUSEPTOL, DAWNY MEDISEPTOL H 1L ZAPACH NEUTRALNY

BEZALDEHYDOWY PREPARAT NA BAZIE ALKOHOLU PRZEZNACZONY DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

ZASTOSOWANIE:

PREPARAT PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI WYŁĄCZNIE POWIERZCHNI NIEINWAZYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH TAKICH JAK: APARATURA MEDYCZNA, ŁÓŻKA I FOTELE ZABIEGOWE, SPRZĘT REHABILITACYJNY, SZAFKI PACJENTA, PORĘCZE ŁÓŻEK SZPITALNYCH, BLATY STOŁÓW MEDYCZNYCH I ELEMENTY SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM KLAMKI, PULPITY, ELEMENTY ZE SZKŁA I PORCELANY I INNYCH POWIERZCHNI MEDYCZNYCH ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLI. POLECANY DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO. PREPARAT MOŻNA

STOSOWAĆ DO PRZEDMIOTÓW MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.

SPOSÓB UŻYCIA:

ROZTWÓR GOTOWY DO UŻYCIA, DO SPRYSKIWANIA LUB PRZECIERANIA. DEZYNFEKOWANĄ POWIERZCHNIĘ CAŁKOWICIE POKRYĆ PREPARATEM PRZY UŻYCIU SPRYSKIWACZA Z ODLEGŁOŚCI OK. 30 CM I POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA LUB POŁAĆ POWIERZCHNIĘ DBAJĄC O CAŁKOWITE POKRYCIE DEZYNFEKOWANEGO OBSZARU I NASTĘPNIE PRZETRZEĆ JEDNORAZOWYM RĘCZNIKIEM.

W PRZYPADKU DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZAWSZE SPRAWDZIĆ ODŁĄCZENIE APARATU OD SIECI.

NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLI. WYRÓB PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALNEGO UŻYTKOWNIKA.

SUBSTANCJA CZYNNNA:

ETANOL* 72 G/100 G PRODUKTU